

Atomizer Nebulizer - кратко упатство за употреба

Овој PDF е работна веб-верзија на упатство за landing page. Пред продажба или официјална употреба, заменете го со оригиналното упатство од производителот.

Безбедносна напомена

- Користете го уредот според официјалното упатство и препорака од лекар или фармацевт.
- Не додавајте раствори или лекови без совет од стручно лице.
- Поставете го уредот на стабилна, рамна и сува површина.
- По употреба, исчистете ги и целосно исушете ги додатоките што доаѓаат во контакт со раствор.

Основни чекори

1. Измијте ги рацете и подгответе чиста работна површина.
2. Поврзете го воздушното црево со компресорот и садот за небулизација.
3. Додадете ја препорачаната количина раствор според стручно лице.
4. Изберете маска за возрасни, маска за деца или усник.
5. Вклучете го уредот и користете го според официјалното упатство.
6. По завршување, исклучете го уредот и исчистете ги додатоките.

Технички податоци

Тип	Клипен компресор
Максимален притисок	185 kPa
Работен притисок	45 / 60 kPa
Проток на воздух	8 / 11 l/min
Ниво на бучава	56 dBA
Капацитет на сад	12 ml
Тежина	1.4 kg

Гаранција	3 години
-----------	----------

Напомена

Овој документ е подготвен како пример за веб-страница. За медицинска употреба и точни процедури секогаш важи официјалното упатство од производителот.

Atomizer Nebulizer | [www.example.com](#)